



Cyberbloc FP-S

Cyberbloc FP-S

primax
INTERNATIONAL

Po prostu unikalny

Monitor obrazowy

Wyważone ramię przegubowe na monitor. Zredukowano wymiary, wyświetlacza dzięki użyciu jednego 27-calowego monitora. Zastosowano interfejs z ekranem dotykowym do sterowania i przetwarzania zdjęć. Przedłużenie przegubowego ramienia monitora pozwala na duży zakres regulacji jego położenia, zmiany wysokości i kąta.

Absolutna operatywność

Obrotowa konsola daje pełny dostęp do ekranu dotykowego z dowolnej strony. Operator stale korzysta z niezakłóconego podglądu obrazów na żywo, mając przy tym zawsze pod ręką elementy sterujące.

Panel detekcyjny

Wybór wielkości detektora 21 x 21 cm lub 30 x 30 cm. Wysoka efektywność obrazowania – wysokie współczynniki DQE i MTF. Dla potrzeb akwizycji obrazów niskodawkowych możliwość wyjmowania kratki antyrozproszeniowej.

Modulowana moc

Modulowana moc promieniowania rentgenowskiego w trybie pulsacyjnym dostosowana do każdego rodzaju procedury. Doskonały stosunek dawki do jakości obrazu.

Kompaktowa konstrukcja

Lekkie mobilne ramię C o dużej średnicy dla łatwego dostępu do stołu operacyjnego. Operatorzy docenią łatwe, szybkie i dokładne ustawianie wokół pacjenta. Rozwiązanie 2 w 1 (aparat i monitory w jednym module) ułatwia poruszanie się w salach operacyjnych i między nimi.



Cyberbloc FP-S

primax
INTERNATIONAL


Gotowy do pracy

Idealnie wyważony obrót orbitalny i kątowy ramienia C zapewnia szybkie i precyzyjne pozycjonowanie. Doskonale reaguje na dotyk operatora.



Ruch orbitalny

Szeroki zakres ruchu orbitalnego ($+65^{\circ} \div -95^{\circ}$) przyspiesza ustawienia projekcji kątowych i bocznych bez konieczności przesuwania aparatu wokół stołu operacyjnego.

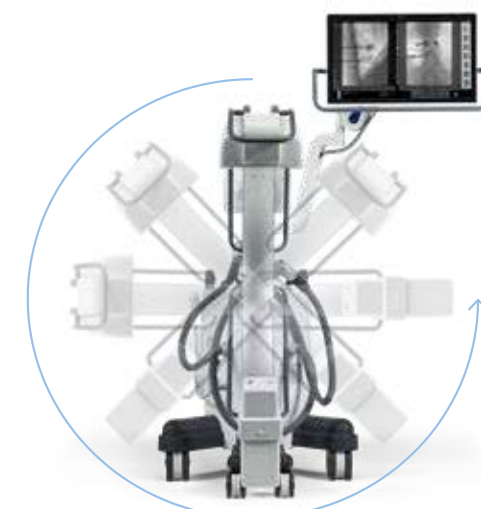


Ruch obrotowy

Precyzyjne ruchy szerokie kąty obrotu wokół osi poziomej ponad $\pm 210^{\circ}$.



Ruch góra / dół

Duży zakres ruchu w pionie wynoszący 450 mm sprawia, że ramię C jest bardziej wszechstronne.

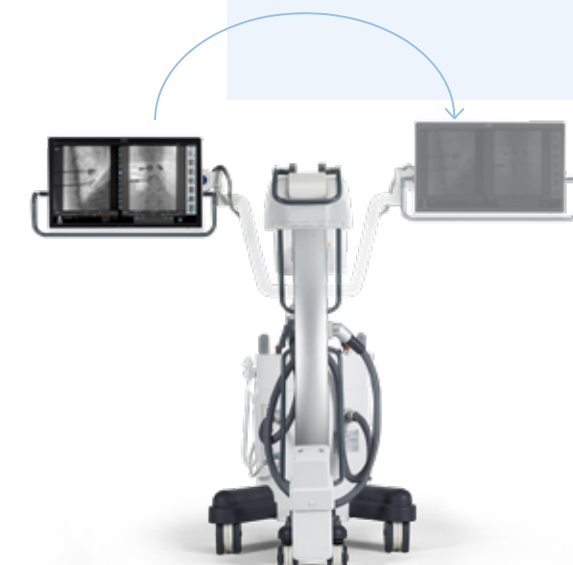

Monitor

Oglądaj obrazy z komfortowej pozycji. Wysokość i nachylenie monitora są regulowane, dzięki czemu zawsze znajdują się przed operatorem. Brak przeszkód na podłodze.

Cyberbloc FP-S

primax
INTERNATIONAL

Wyświetlacz

Ultraszeroki 27-calowy monitor umożliwia jednocześnie wyświetlanie obrazów bieżącego i wcześniej zapisanych. Dzięki rozdzielczości 4 MP monitor pokazuje nawet najdrobniejsze szczegóły. Duży zakres ruchu przegubowego ramienia umożliwia wygodne ustawienie monitora w idealnej pozycji do pracy.

Konsola

Konsola o wysokiej rozdzielczości i jasności z kompletnym panelem operacyjnym zapewniającym wszystkie narzędzia do obróbki obrazu, takie jak akceptacja, selekcja, edycja, przenoszenie, transmisja, kompresja, zmniejszanie, powiększanie ... wystarczy prosty dotyk.



Dodatkowy monitor

Opcjonalna bezprzewodowa transmisja wideo, zasilana potężnym akumulatorem litowo-jonowym dla zwiększenia autonomii. Szerokie pole widzenia, powielanie obrazu głównego monitora.



Cyberbloc FP-

Ulepszona ergonomia

Lekki, ale mocny, dzięki starannie dobranym materiałom: stopom z metali lekkich, włóknom węglowym, poliuretanowi i specjalnym polimerom.

Wszystkie funkcje są łatwo i szybko dostępne za pośrednictwem ekranu wielodotykowego. Nasz unikalny graficzny interfejs użytkownika działa natychmiastowo, jest intuicyjny i reaguje na gesty wykonane palcami.

primax
INTERNATIONAL



Sterowanie funkcjami za pomocą bezprzewodowego przełącznika nożnego, bez kabli na podłodze.



Zdejmowana kratka przeciwrozproszeniowa do zabiegów pediatrycznych z niską dawką.



Emisja promieniowania rentgenowskiego jest sterowana za pomocą przełącznika nożnego lub wielofunkcyjnego przełącznika ręcznego.



Najlepsza możliwa łączność: USB, Ethernet, HDMI, WiFi.



Centrowanie przy zerowej dawce dzięki lokalizatorom laserowym, zarówno po stronie lampy rentgenowskiej, jak i po stronie detektora z płaskim panelem.



Szybkie logowanie za pomocą zbliżeniowych kart magnetycznych z funkcją NFC.

Cyberbloc FP-S

primax
INTERNATIONAL

Zawsze, Wszędzie

Globalne wsparcie

Primax International zapewnia wsparcie techniczne dla swoich produktów przez cały okres ich użytkowania, niezależnie od tego, gdzie są eksploatowane.

Zdalne wsparcie

Łączność jest natywna dla Cyberbloc FP-S, dzięki czemu zdalne wsparcie jest tak proste, jak to tylko możliwe, niezależnie od tego, czy potrzebujesz wykonać testy wydajności, aktualizacje oprogramowania, naprawę czy konserwację.

Wsparcie lokalne

Dla lokalnych przedstawicieli producenta regularnie organizowane są szkoleniowe kursy techniczne. Umożliwiają inżynierom serwisu profesjonalną instalację i obsługę naszego asortymentu sprzętu.



Cyberbloc FP-S



primax
INTERNATIONAL

Via Alessandro Volta, 10
24060 Torre de Roveri ITALY
+39 035 4500002
sales@primaxint.com
www.primaxint.com

MEDIX

Dystrybucja i serwis
MEDIX Sławomir Szwed sp.k.
04191 Warszawa ul. Kokoryczki 18
+48 22 5169860
info@medix.com.pl
www.medix.com.pl